

簡易ブース

陰圧
対応

陽圧
対応



組み立て式ブース



組み立て
約20分

陰圧
感染隔離
対応

陽圧
保護隔離
対応

フレームを組み合わせることで設置可能。
分解して収納出来ます。

陰圧
感染隔離
対応



医療施設・・・感染隔離病室・発熱外来・
透析室・ICU・ゾーニング用前室
介護施設・・・感染静養室・多床室
家族面会室・ゾーニング用入口

ブース使用例

★組み立て方★

①側面パネルの金具部分を
組み合わせます。



※金具拡大図



②入口上部・天井部分は
ねじで止めます。



③入口部分にビニール
シートを取り付ければ完成



※入口上部拡大図



※ねじ拡大図

折りたたみ式ブース

組み立て
約10分

陰圧
感染隔離
対応

陽圧
保護隔離
対応



部品がすべて一体化されているため、
フレームを広げるだけで設置可能。
折りたたむことで、コンパクトに収納出来ます。

陽圧
保護隔離
対応



陽圧装置

お客様の環境に合った
レイアウトで
製作できます！

ブース使用例 医療施設・・・簡易クリーンルーム

※上記は参考例です。


★組み立て方★

- ①フレームの端と端を持ち、折りたたまれているフレームを広げる。
※高さも調整する。



- ②広げたフレームにビニールをかぶせ、四方向のファスナーを閉めれば完成

★ブース内★陰圧装置の設置例

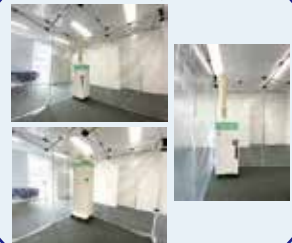

製品仕様	組み立て式ブース	折りたたみ式ブース
外観		
標準サイズ	W2000mm×D2405mm×H2025mm (※本体サイズはご要望により変更可能)	W2400mm×D2400mm×H2400mm (※本体サイズはご要望により変更可能)
ブース材質	静電エンビパネル 透明 (自己消火・難燃性)	エンビビニールシート 透明 抗菌・防炎・0.3 t
フレーム	アルミ	アルミ
重量	117kg	31.4kg (フレーム: 19.5kg/ビニールテント: 11.9kg)
入口扉	アキレス静電クリスタルシート 防炎・帯電防止	両開きカーテン (マジックテープ式)
ブース部品	 ビニール  側面パネル (入口×2・壁×8)  入口上部パネル×1  天井パネル×3	 ビニール  フレーム専用バック  フレーム本体

製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
また、カタログの色合いは実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。
お問い合わせは

総発売元：

地球と一緒に深呼吸
EBARA 荏原実業株式会社

計測器・医療本部 医療環境部

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12

TEL 044-981-0560

FAX 044-981-0561

URL <https://www.ej-protect.jp/>

E-mail ej-med@ejk.co.jp