

穿刺細胞診用アスピレータ

ベクスコア アスピレータ ¥73,000-



©ディスポシリンジ・注射針は付属していません。

ベクスコア アスピレータは、穿刺細胞診を迅速かつ正確に行うための軽量・高機能な吸引補助器です。

簡便で確実な操作性

- ・軽量ハンドルにより、穿刺細胞診における血液や体液の吸引を片手で簡単に、迅速に行えます。
- ・ディスポシリンジ対応：10ccおよび20ccのシリンジをしっかりと固定してハンドルを引いて使用します。

幅広い適用範囲

- ・注射器吸引の補助器として設計されています。
- ・乳腺、リンパ節、甲状腺、前立腺、皮膚腫瘍など、幅広い種類のがん組織の細胞診、臨床試験や実験室での研究など、多岐にわたる場面での使用が可能です。


軽量で耐久性の高い設計

- ・本体はプラスチックと軽量ステンレスで構成されており、操作時の負担を軽減し、スムーズな使用感を実現しています。
- ・本体サイズは H100 × D142 × W25 (mm) とコンパクトです。

ご使用上の注意点

- ・本製品は未消毒状態で供給されます。ご使用の際は、滅菌ガーゼに滅菌水を含ませて汚れを拭き取り、指定の消毒剤で適切に洗浄してからお使いください。

使用方法

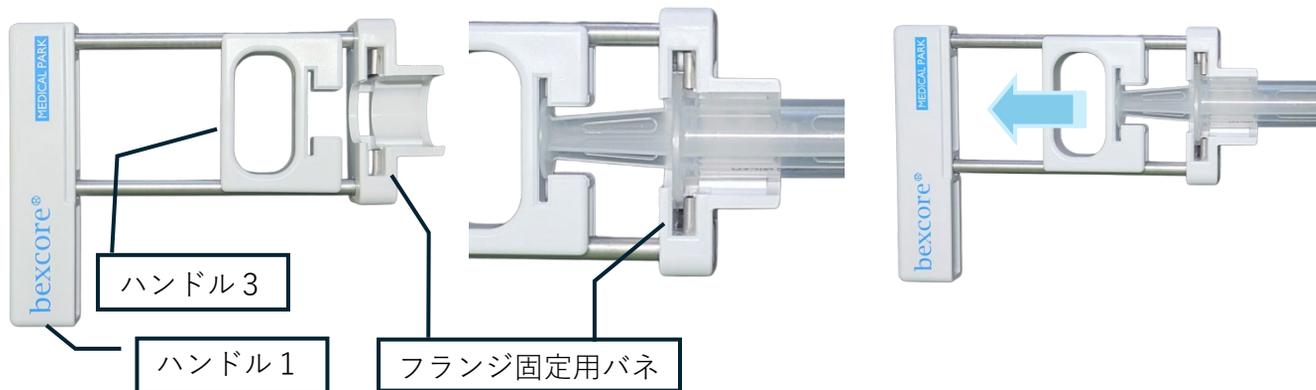

1. ハンドル1が左側にくるように向けます。
2. 10ccもしくは20ccのシリンジをフランジ固定用板バネとハンドルにセットします。取付・取外し時に半分回転するようにすると簡単です。
3. ハンドル1を手の平で握り、ハンドルに指を掛け、手前に引く様にして使用します。

仕様

販売名	ベクスコア アスピレータ
一般的名称	機械器具 (47) 注射針及び穿刺針
医療機器分類	一般医療機器 (クラスI) 生検用穿刺器具 (70216000)
届出番号	27B2X90003000008
寸法(mm)	100 (W) × 25 (D) × 142 (H)
重量	65g
装着可能注射器	10cc もしくは20cc
原材料	・ハンドル1 樹脂 (ポリカーボネート) ・レールバー 金属 (ステンレス鋼) ・ハンドル2 樹脂 (ポリカーボネート) ・シリンジホルダー 樹脂 (ポリカーボネート) ・フランジ固定用板バネ 金属 (ステンレス鋼)
滅菌/供給状態	未消毒

※本製品は滅菌非対応製品となります

清掃はイソプロピルアルコール (消毒液) による拭き取りとなります。

製造販売業者

株式会社タイヨウ

〒536-0025 大阪市城東区森之宮2丁目4-29

販売代理店

総販売元

荏原実業テクノロジーズ株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12

TEL : 044-981-0560 FAX : 044-981-0561

Email : ej-med@ej-tech.jp